


F

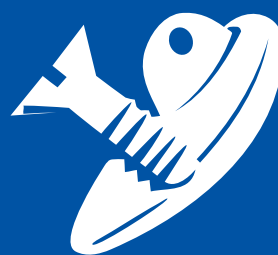



F



Brilonderdelen

- F 2 Overzicht neuspads
- F 12 Tips & tricks: siliconenpads Minifits
- F 15 Plakpads, padplaatjes
- F 16 Tips & tricks: zelfklevende neuspadkussen
- F 18 Tips & tricks: padsteunen
- F 19 Padsteunen
- F 22 Overzicht schroeven en moeren
- F 35 Tips & tricks: 4-in-1-schroeven
- F 52 Ringen en hulzen
- F 56 Scharnieren
- F 60 Overzicht oortips en veren
- F 68 Tips & tricks: kruloortips
- F 74 Krimpkous
- F 75 Lange oortips
- F 76 Veren
- F 80 Onderdelen voor glasbrillen
- F 82 Inlegrand
- F 83 Nylordraad
- F 84 Oefenmateriaal

Het B & S neuspadaassortiment:

- Uitgebreide keuze
- Voor alle toepassingen
- Snel vinden voor eenvoudig bestellen



F
2

3 stappen bij bestelling

1. Selecteer het materiaal (inhoud rechts)
2. Selecteer grootte en vorm
3. Selecteer type montage

Montagesystemen



Klik-
systeem



Schroef-
systeem



Schroef- EN
Kliksysteem

Handig om te weten

f&w & De pictogrammen garanderen:

- Hoogwaardige basismaterialen
- Maximale duurzaamheid en optische transparantie
- Kleurecht
- Geen vliesvorming



f&w Made in Germany Premium neuspads bieden u:

- PVC pads zonder ftalaathoudende weekmakers
- Ontbreken van spuitpunten voor beter draagcomfort
- Afgeronde kanten
- Hoge dimensionale nauwkeurigheid en hoge kwaliteit van de samengestelde materialen
- Gecertificeerd volgens ISO 9001

Logic®










Smart, Universal Nose Pads

U.S. Patent No. 5.872.612

Hilco Logic® pads:

- Gepatenteerde neuspads, passend voor schroef- en kliksysteem
- Premium anti-slip siliconen
- Vermindert de voorraad neuspads tot wel 50 %

Gemakkelijk te vinden in één oogopslag

	Siliconenpads <ul style="list-style-type: none"> ▪ Logic® ▪ Symmetrisch ▪ Extra dun, symmetrisch ▪ Rond en classic 	F 4 F 5 F 5 F 6
	Comfortpads <ul style="list-style-type: none"> ▪ Air Active ▪ Biofeel 	F 7 F 7
	Siliconenpads en PVC pads, halfhard <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zadel pads ▪ „Systeem 3” ▪ Primadonna systeem ▪ Air Titanium en Minimal Art 	F 8 F 8 F 9 F 9
	PVC pads, halfhard <ul style="list-style-type: none"> ▪ Met kunststofkern ▪ Met metaalkern ▪ Dunne uitvoering 	F 10 F 10 F 11
	Kunststof pads, hard <ul style="list-style-type: none"> ▪ Extra dun ▪ Met kunststofkern 	F 11 F 1
	Speciale pads en neusbruggen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pads, specifieke modellen ▪ ic! berlin neuspads ▪ Siliconen neusbruggen ▪ Pads voor Ray Ban monturen 	F 13 F 13 F 13 F 14
	Speciale pads, anti-allergisch <ul style="list-style-type: none"> ▪ Glas ▪ Titanium 	F 14 F 14
	Neuspdkussen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schuimrubber ▪ Siliconen 	F 15 F 16–F 17
	Padsteunen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voor kunststof monturen ▪ Voor metalen monturen 	F 18–F 20 F 21
	Assortiments <ul style="list-style-type: none"> ▪ Assortiment Logic® pad ▪ Siliconenpad assortiment ▪ Onderdelenset voor Ray Ban monturen 	F 4 F 6 F 15




Siliconenpads

Schroef- en klikpads
Logic® , rond


	Logic®	0217 09	20 stuks
9,0 mm		0217 09-100	100 stuks

Schroef- en klikpads
Logic® , symmetrisch


	Logic®	0217 11	20 stuks
11,0 mm		0217 11-100	100 stuks

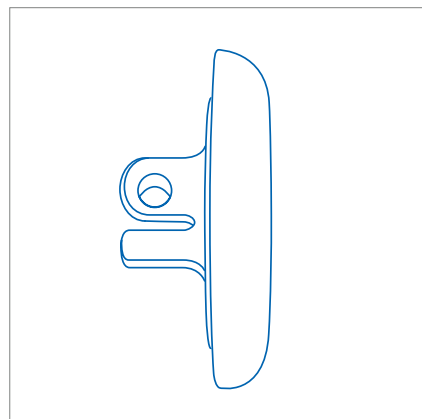


Logic®

	0217 13	20 stuks
13,0 mm	0217 13-100	100 stuks

Logic®


	0217 15	20 stuks
15,0 mm	0217 15-100	100 stuks

Logic®

	0217 17	20 stuks
17,0 mm	0217 17-100	100 stuks

Assortiment Logic® pad

- **Inhoud:** elk 20 stuks van Nr. 0217 09, 0217 11, 0217 13, 0217 15 en 0217 17
- In praktische assortiment box

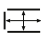0217 50  13 x 3,5 x 9 cm



Siliconenpads



Klikpads symmetrisch



10,0 mm

f&w	0227 10	20 stuks
	0227 10-50	50 stuks
	0227 10-100	100 stuks
	0227 10-200	200 stuks



10,0 mm

	0237 10	20 stuks
--	----------------	----------



13,0 mm

f&w	0227 13	20 stuks
	0227 13-50	50 stuks
	0227 13-100	100 stuks
	0227 13-200	200 stuks



14,5 mm

f&w	0227 15	20 stuks
	0227 15-50	50 stuks
	0227 15-100	100 stuks
	0227 15-200	200 stuks



16,0 mm

f&w	0227 16	20 stuks
	0227 16-50	50 stuks
	0227 16-100	100 stuks
	0227 16-200	200 stuks



18,0 mm

f&w	0227 18	20 stuks
	0227 18-100	100 stuks
	0227 18-200	200 stuks



Klikpads symmetrisch, extra dun



13,0 mm

	0219 13	20 stuks
	0219 13-50	50 stuks
	0219 13-100	100 stuks



15,0 mm

	0219 15	20 stuks
	0219 15-50	50 stuks
	0219 15-100	100 stuks



Schroefpads symmetrisch



10,0 mm

f&w	0228 10	20 stuks
	0228 10-50	50 stuks
	0228 10-100	100 stuks
	0228 10-200	200 stuks



10,0 mm

	0238 10	20 stuks
--	----------------	----------



13,0 mm

f&w	0228 13	20 stuks
	0228 13-50	50 stuks
	0228 13-100	100 stuks
	0228 13-200	200 stuks



14,5 mm

f&w	0228 15	20 stuks
	0228 15-50	50 stuks
	0228 15-100	100 stuks
	0228 15-200	200 stuks



16,0 mm

f&w	0228 16	20 stuks
	0228 16-50	50 stuks
	0228 16-100	100 stuks
	0228 16-200	200 stuks



18,0 mm

f&w	0228 18	20 stuks
	0228 18-100	100 stuks
	0228 18-200	200 stuks



Schroefpads symmetrisch, extra dun



13,0 mm

	0229 13	20 stuks
	0229 13-50	50 stuks
	0229 13-100	100 stuks



15,0 mm

	0229 15	20 stuks
	0229 15-50	50 stuks
	0229 15-100	100 stuks



Siliconenpads



Klikpads rond en classic



9,0 mm

f&w	0278 09	20 stuks
	0278 09-50	50 stuks
	0278 09-100	100 stuks
	0278 09-200	200 stuks



15,0 mm

f&w	0216 15	10 paar
	0216 15-25	25 paar
	0216 15-50	50 paar
	0216 15-100	100 paar
	0216 15-250	250 paar



17,0 mm

f&w	0216 17	10 paar
	0216 17-25	25 paar
	0216 17-50	50 paar
	0216 17-100	100 paar
	0216 17-250	250 paar



19,0 mm

f&w	0216 19	10 paar
	0216 19-25	25 paar
	0216 19-50	50 paar
	0216 19-100	100 paar
	0216 19-250	250 paar



Schroefpads rond en classic



9,0 mm

f&w	0288 09	20 stuks
	0288 09-50	50 stuks
	0288 09-100	100 stuks
	0288 09-200	200 stuks



15,0 mm

f&w	0226 15	10 paar
	0226 15-25	25 paar
	0226 15-50	50 paar
	0226 15-100	100 paar
	0226 15-250	250 paar



17,0 mm

f&w	0226 17	10 paar
	0226 17-25	25 paar
	0226 17-50	50 paar
	0226 17-100	100 paar
	0226 17-250	250 paar



19,0 mm

f&w	0226 19	10 paar
	0226 19-25	25 paar
	0226 19-50	50 paar
	0226 19-100	100 paar
	0226 19-250	250 paar

F
6

Siliconenpad assortiment

In de klapbox Nr. 1458 20.

Inhoud: 12 soorten van de meest gangbare siliconen pads en neusbruggen, totaal 172 stuks
Wijzigingen voorbehouden.

0200 10

210 g



Onze onderdelenboxen vindt u op pagina G 14 en G 15.




Comfortpads



Air Active Pads

zijn gemaakt van extreem flexibel siliconen materiaal en bieden een **verhoogd draagcomfort door een luchtkussen**. Drukpunten worden vermeden.

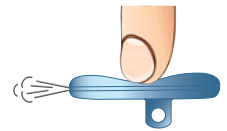

Air Active Pads, symmetrisch, kliksysteem			
	f&w	0296 13	10 stuks
13,0 mm		met kunststofkern	
	f&w	0296 14	10 stuks
14,5 mm		met kunststofkern	
	f&w	0296 17	10 stuks
17,0 mm		met kunststofkern	

Air Active Pads, symmetrisch, schroefstelsysteem			
	f&w	0297 11	10 stuks
11,0 mm			
	f&w	0297 14	10 stuks
14,5 mm			
	f&w	0297 17	10 stuks
17,0 mm			
	f&w	0297 25	10 stuks
14,5 mm		met kunststofkern	

„System 3 AirTec“

	f&w	0298 11	10 stuks
11,0 mm			

„System 3 AirTec“

	f&w	0298 12	10 stuks
11,9 mm			



Biofeel Pads

zijn gemaakt van flexibel siliconen materiaal en bieden een **verhoogd draagcomfort door een gelkussen**. Drukpunten worden vermeden.



Biofeel Pads, kliksysteem			
		0214 01	2 paar
12,5 mm			
		0214 10	10 paar
12,5 mm			


Biofeel Pads, schroefstelsysteem			
		0211 01	2 paar
12,5 mm			
		0211 10	10 paar
12,5 mm			




Siliconenpads en TPE




Siliconen zadelpads klik

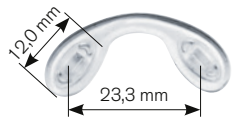


f&w 0225 12 3 stuks
0225 12-9 9 stuks

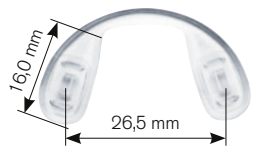


f&w 0225 16 3 stuks
0225 16-9 9 stuks

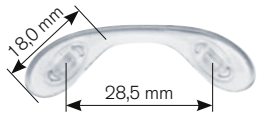

f&w 0225 18 3 stuks
0225 18-9 9 stuks

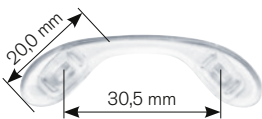

f&w 0225 20 3 stuks
0225 20-9 9 stuks

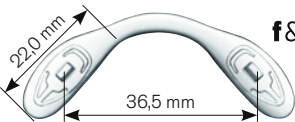


f&w 0225 22 3 stuks
0225 22-9 9 stuks




Siliconen zadelpads schroef




f&w 0235 12 3 stuks
0235 12-9 9 stuks

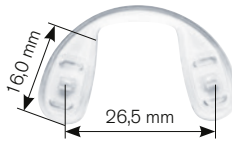


f&w 0235 16 3 stuks
0235 16-9 9 stuks

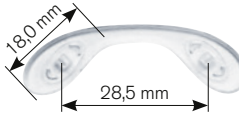

f&w 0235 18 3 stuks
0235 18-9 9 stuks

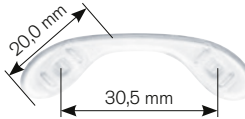


f&w 0235 20 3 stuks
0235 20-9 9 stuks

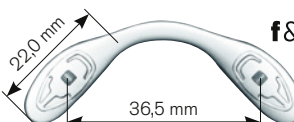

f&w 0235 22 3 stuks
0235 22-9 9 stuks

„System 3” Siliconen

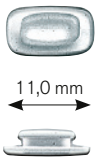

f&w 0279 11 20 stuks



f&w 0279 13 20 stuks



f&w 0279 51 10 paar
wigvormig

„System 3 Dash M” Siliconen



f&w 0276 11 20 stuks



f&w 0277 11 20 stuks

Met gemoderniseerde, flexibeler steun voor een beter draagcomfort.

„System 3” TPE (thermoplastische elastomeer)



f&w 0274 11 20 stuks



De passende padsteunen vindt u op pagina F 21 bij Nr. 0276 01.





Siliconenpads en PVC pads, halfhard






Primadonna systeem Siliconen

 9,0 mm	f&w	0280 09	20 stuks
 13,0 mm	f&w	0212 13	20 stuks
 13,0 mm		0212 13-100	100 stuks
 14,5 mm	f&w	0212 15	10 paar
 14,5 mm		0212 15-50	50 paar





Primadonna systeem PVC

 13,0 mm	f&w	0213 13	20 stuks
 13,0 mm		0213 13-100	100 stuks
 14,5 mm	f&w	0213 15	10 paar
 14,5 mm		0213 15-50	50 paar

Air Titanium en Minimal Art Siliconen






 8,0 mm	f&w	0279 08	20 stuks
 8,0 mm		0279 08-100	100 stuks
 9,0 mm	f&w	0279 09	20 stuks
 9,0 mm		0279 09-100	100 stuks
 9,5 mm	f&w	0279 10	20 stuks
 9,5 mm		0279 10-100	100 stuks
		Hogere stabiliteit door ingezette kunststof stift.	
 12,0 mm	f&w	0279 12	20 stuks
 12,0 mm			
 15,5 mm	f&w	0279 15	20 stuks
 15,5 mm			
 11,0 mm		0270 11	10 paar
 11,0 mm			


Air Titanium en Minimal Art PVC

 9,5 mm	f&w	0271 09	20 stuks
 9,5 mm			
 11,5 mm	f&w	0271 11	20 stuks
 11,5 mm			





PVC pads, halfhard, met kunststofkern

	Transparant, kliksysteem		
 9,0 mm	f&w	0272 09	20 stuks
		0272 09-100	100 stuks
		0272 09-200	200 stuks
 13,0 mm	f&w	0272 13	20 stuks
		0272 13-100	100 stuks
		0272 13-200	200 stuks
 14,5 mm	f&w	0272 15	10 paar
		0272 15-50	50 paar
		0272 15-100	100 paar
 17,0 mm	f&w	0272 17	10 paar
		0272 17-50	50 paar
		0272 17-100	100 paar





	Transparant, schroefstelsysteem		
 9,0 mm	f&w	0273 09	20 stuks
		0273 09-100	100 stuks
		0273 09-200	200 stuks
 13,0 mm	f&w	0273 13	20 stuks
		0273 13-100	100 stuks
		0273 13-200	200 stuks
 14,5 mm	f&w	0273 15	10 paar
		0273 15-50	50 paar
		0273 15-100	100 paar
 17,0 mm	f&w	0273 17	10 paar
		0273 17-50	50 paar
		0273 17-100	100 paar

PVC pads, halfhard, met metaalkern

	Transparant, goud, kliksysteem		
 15,0 mm		0231 15	20 stuks




	Transparant, goud, schroefstelsysteem		
 15,0 mm		0256 15	20 stuks


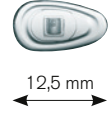
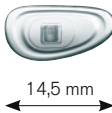
	Transparant, zilver, kliksysteem		
 15,0 mm		0230 15	20 stuks

	Transparant, zilver, schroefstelsysteem		
 12,0 mm		0255 12	20 stuks
 15,0 mm		0255 15	20 stuks
 17,5 mm		0255 17	20 stuks






PVC pads, halfhard


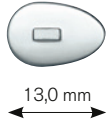
	Transparant, kliksysteem, dunne uitvoering 1,5 mm		
	f&w	0284 13	20 stuks
12,5 mm			
	f&w	0284 15	10 paar
14,5 mm			


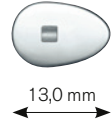
	Transparant, schroefstelsel, dunne uitvoering 1,5 mm		
	f&w	0285 13	20 stuks
12,5 mm			
	f&w	0285 15	10 paar
14,5 mm			





Kunststof pads, hard





	Extra dun, bijzonder transparante, lichte uitvoering, kliksysteem		
		0253 22	20 stuks
12,0 mm			

	Extra dun, bijzonder transparante, lichte uitvoering, schroefstelsel		
		0254 22	20 stuks
12,0 mm			

	Bijzonder transparante, lichte uitvoering, kliksysteem		
	f&w	0253 12	20 stuks
13,0 mm			

	Bijzonder transparante, lichte uitvoering, schroefstelsel		
	f&w	0254 12	20 stuks
13,0 mm			

	Transparant met kunststofkern, kliksysteem		
	f&w	0223 13	20 stuks
13,0 mm		0223 13-100	100 stuks
	f&w	0223 15	10 paar
14,5 mm		0223 15-50	50 paar
	f&w	0223 18	10 paar
17,5 mm		0223 18-50	50 paar

	Transparant met kunststofkern, schroefstelsel		
	f&w	0224 13	20 stuks
13,0 mm		0224 13-100	100 stuks
	f&w	0224 15	10 paar
14,5 mm		0224 15-50	50 paar
	f&w	0224 18	10 paar
17,5 mm		0224 18-50	50 paar





Siliconenpads Minifits

Anti-slip kunststof monturen

Siliconenpads Minifits

Bestelnr. 0232 00, 10

Liniaal

Bestelnr. 2320 01

Universele stift

Bestelnr. 2623 01

Gereedschaphouder

Bestelnr. 2062 00

Spiraalboren, HSS

Bestelnr. 2032 16



ca. 15 minuten


Zo werkt het

Markeren




1

Gat 1 boren

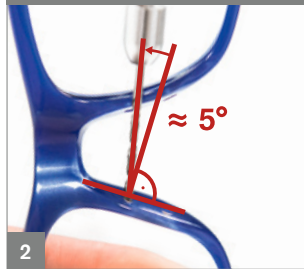

2

Gat 2 boren

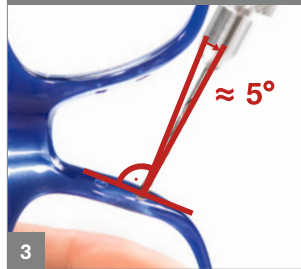


3

Minifits monteren



4

Klaar

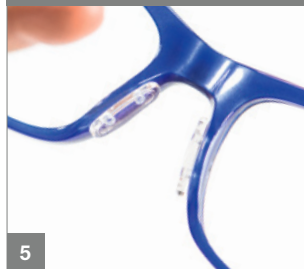











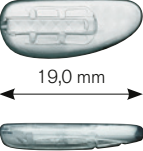




5



Speciale pads en neusbruggen

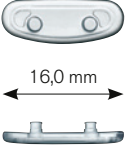Pads, specifieke modellen

		0201 07	20 stuks
7,0 mm		PVC	Insteken
			
	f&w	0232 10	10 stuks
12,0 mm		Siliconen	Minifit
			
		0201 13	10 stuks
13,0 mm		Siliconen	Verticaal insteken
			
	f&w	0267 14	10 stuks
14,0 mm		Siliconen	Pocket systeem
			
	f&w	0232 00	10 stuks
16,0 mm		Siliconen	Minifit
			
		0277 01	3 paar
19,0 mm		Siliconen	Verticaal insteken
			

ic! berlin neuspads

	ic! berlin 	0264 01	4 stuks
14,0 mm		Thermo-plastische elastomeer	Verticaal insteken
			
	ic! berlin 	0264 02	4 stuks
14,0 mm		Thermo-plastische elastomeer	Verticaal insteken
			
	ic! berlin 	0264 03	4 stuks
14,0 mm		Thermo-plastische elastomeer	Verticaal insteken
			

Siliconen neusbruggen, klein

	f&w	0241 01	3 stuks
14,9 mm		Goud kern, voor metalen monturen	
	f&w	0241 10	3 stuks
14,9 mm		Zilver kern, voor metalen monturen	

Siliconen neusbruggen, groot






	f&w	0242 01	3 stuks
16,9 mm		Goud kern, voor metalen monturen	
	f&w	0242 10	3 stuks
16,9 mm		Zilver kern, voor metalen monturen	








Speciale pads









	Glas, allergievrij, kliksysteem		
		0248 13	10 stuks
13,0 mm			
		0248 15	10 stuks
15,0 mm			




	Glas, allergievrij, schroefstelsysteem		
		0249 13	10 stuks
13,0 mm			
		0249 15	10 stuks
15,0 mm			

	Titanium, allergievrij, kliksysteem		
	f&w	0257 08	4 stuks
8,0 mm			
		0257 08-10	10 stuks
Gepolijst			
	f&w	0203 01	4 stuks
13,0 mm			
Gepolijst			
	f&w	0203 02	4 stuks
13,0 mm			
Gematteerd			

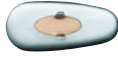	Titanium, allergievrij, schroefstelsysteem		
	f&w	0258 08	4 stuks
8,0 mm			
		0258 08-10	10 stuks
Gepolijst			
	f&w	0204 01	4 stuks
13,0 mm			
Gepolijst			
	f&w	0204 02	4 stuks
13,0 mm			
Gematteerd			

Pads voor Ray Ban monturen

	0243 02	10 stuks	
15,0 mm			
	Soft-PVC		Ray Ban (B&L)
	0243 03	10 stuks	
15,0 mm			
	Soft-PVC		Ray Ban (B&L)
	0243 12	10 stuks	
15,0 mm			
	Siliconen		Ray Ban (B&L)
	0243 13	10 stuks	
15,0 mm			
	Siliconen		Ray Ban (B&L)

	Siliconen met titanium kern, allergievrij, schroefstelsysteem		
	0259 01	4 stuks	
13,0 mm			
			

Siliconen

Siliconen



De passende padsteunen vindt u op pagina F 21 bij Nr. 0299 01 en 0299 02.



Onderdelenset voor Ray Ban monturen

Omvat de passende PVC-neuspads, neuspadssteunen, veren, scharnier- en bakschroeven voor de meest voorkomende Ray Ban monturen.

0243 50

 17,5 x 2,5 x 10,5 cm



Neuspakdussen, padplaatjes



Verhoogt het draagcomfort van kunststof monturen



0,8 > 2,0 mm

Painex – neuspakdussen assortiment

Voor vermindering van de neussteunbreedte.

Schuimrubber, zelfklevend, wit.

1 strip = 4 paar

Inhoud: 9 strips à 1,0 mm dikte

12 strips à 1,5 mm dikte

9 strips à 2,0 mm dikte


0739 00


Painex – neuspakdussen


Per dikte.

1 strip = 4 paar

Inhoud: 12 strips

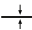0739 10  1,0 mm

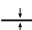0739 15  1,5 mm


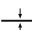
0739 20  2,0 mm

Padplaatjes om te kitten

Asymmetrische padplaatjes om op kunststof monturen te kitten.

Als lijm is bv aceton Nr. 3173 00 geschikt.

Inhoud: 6 paar

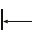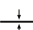0263 00  19 x 8 mm  0,8 > 2,0 mm



Zelfklevende neuspadkussen

Één kussen, 2 varianten



Neuspadkussen assortiment

Bestelnr. 0758 50

of per stuk:


Zelfklevende neuspadkussen

Bestelnr. 0758 01, 02, 03




Zo werkt het

Optie 1: Afsnijden

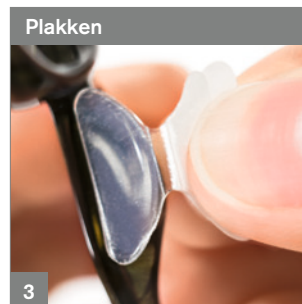

Optie 2: Omvouwen | Herhaal de stappen 1-3

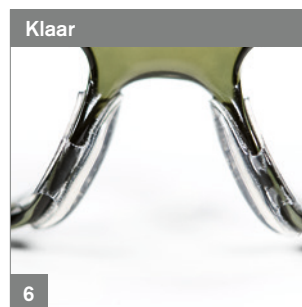

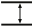
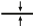

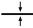


Neuspadkussen

Zelfklevende **siliconenfolie**.

Breedte: elk 7 mm


Inhoud: 10 paar

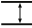0758 01	Maat S	 19 mm	 2,0 mm
0758 02	Maat M	 19 mm	 2,4 mm
0758 03	Maat L	 19 mm	 2,7 mm



Neuspadkussen assortiment

Inhoud: elk 10 paar van Nr. 0758 01; 0758 02 en 0758 03

0758 50  30 paar





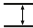

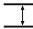

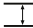




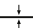
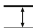
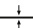
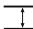
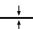
Vanwege achterlating van restanten van bijv. cosmetica, huidvet o.i.d. wordt wisselen na 3 tot 4 weken aanbevolen.



Neuspadkussen

Zelfklevende **siliconenfolie**.

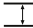Inhoud: 20 stuks

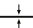
0748 13	 13 mm	 0,7 mm
0748 15	 15 mm	 0,7 mm
0748 17	 17 mm	 0,7 mm
0748 19	 19 mm	 0,7 mm
0748 23	 13 mm	 1,0 mm
0748 25	 15 mm	 1,0 mm
0748 27	 17 mm	 1,0 mm
0748 29	 19 mm	 1,0 mm



Bijna onzichtbaar


Neuspadkussen assortiment

Inhoud: elk 20 stuks van Nr. 0748 13; 0748 15; 0748 17 en 0748 19

0748 50  80 stuks

Neuspadkussen assortiment

Inhoud: elk 20 stuks van Nr. 0748 23; 0748 25; 0748 27 en 0748 29

0748 51  80 stuks





Padsteunen voor kunststof monturen

Past altijd!

Montageset

Bestelnr. 0304 50

of per stuk:

Padsteunen, beta-titanium

Bestelnr. 0304 01, 02, 03, 04, 11, 21

Bestelnr. 0305 01, 03, 11, 21

Montagewerktuig

Bestelnr. 0304 00

Spiraalboren, HSS

Bestelnr. 2032 15

Kunststof pad

Bestelnr. 0227 10, 0228 10

Padschroeven

Bestelnr. 0896 00

Gereedschaphouder

Bestelnr. 2068 00

Staalrees

Bestelnr. 2240 41

Universele stift


Bestelnr. 2623 01



15 minuten

Zo werkt het

Frezen

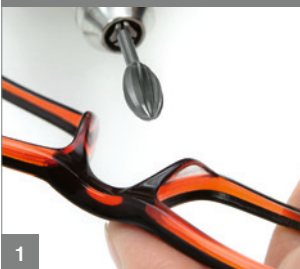


1

Polijsten



2

Markeren

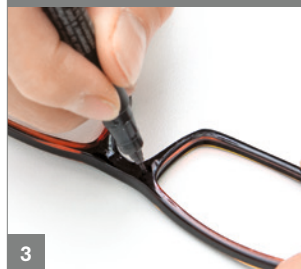

3

Boren



4

Inspannen




5

Inzetten




6

Bevestigen

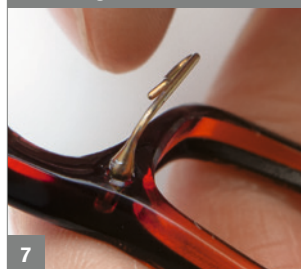

7

Klaar

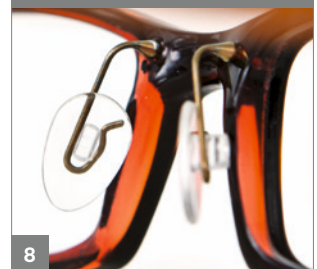

8



Padsteunen voor kunststof monturen

- Eenvoudiger anatomisch aanpassen
- Verbeterd draagcomfort
- Titanium of kunststof uitvoering

Markeerhulp „APP”

De Accurate Point Positioner werd ontwikkeld om een precieze en exacte boorpunt positie van de kunststof en Beta titanium padsteunen Nr. 0303 . ., 0304 . ., en 0305 . . te garanderen.

Met deze hulp bent u altijd zeker van exact horizontale boringen.



0303 10

Montageset padsteunen Beta titanium

- **Inhoud:** Gereedschap voor padsteunen, 16 paar padsteunen, passende boor (Nr. 2032 15) en neuspads (Nr. 0227 10 en 0228 10 en padschroeven (Nr. 0896 00)
- In handige box



0304 50  105 x 23,5 x 178 mm

Beta titanium

- Montage d.m.v. éénpunts systeem
- Kleine boring voldoende
- Montage slechts door insteekverbinding
- Passende boor: Nr. 2032 15



Kliksysteem

0304 . .

 2 paar

Maat S 10 mm


Maat L 12 mm

Maat XL 16 mm

Bestelnr.	Kleur	Bestelnr.	Kleur	Bestelnr.	Kleur
0304 21	Zilver	0304 01	Zilver	0304 11	Zilver
0304 25	Zwart	0304 02	Roze	0304 15	Zwart
0304 26	Goud	0304 03	Bruin	0304 16	Goud
		0304 05	Zwart		
		0304 06	Goud		

Schroefstelsysteem

0305 . .

 2 paar

Maat S 10 mm

Maat L 12 mm

Maat XL 16 mm

Bestelnr.	Kleur	Bestelnr.	Kleur	Bestelnr.	Kleur
0305 21	Zilver	0305 01	Zilver	0305 11	Zilver
0305 25	Zwart	0305 03	Bruin	0305 15	Zwart
0305 26	Goud	0305 05	Zwart	0305 16	Goud
		0305 06	Goud		



Passende schroeven: Nr. 0896 00, 0896 00TL en 0896 20 (lengte 4,0 mm, schroefdraad 1,0 mm) vindt u op pagina F 24.

Montagewerktuig voor beta-titanium padsteunen

- Voor het eenvoudig monteren van titanium padsteunen
- Ligt prettig in de hand
- Maakt precisiewerken mogelijk




0304 00



Padsteunen voor kunststof monturen

Montageset padsteunen kunststof

- **Inhoud:** Gereedschap voor padsteunen, 4 verschillende padsteunen (elk 6 paar per kleur), passende boor (Nr. 2032 15) en neuspads (Nr. 0254 12)
- In handige box

0303 51  105 x 23,5 x 178 mm



Kunststof

0303 ..  4 paar



0303 01
Zwart



0303 02
Rookbruin



0303 04
Transparant



0303 07
Rookgrijs

Montagewerktuig voor kunststof padsteunen

- Voor het eenvoudig monteren van kunststof padsteunen
- Licht prettig in de hand
- Maakt precisiewerken mogelijk

0303 00



Padsteunen voor kunststof monturen



f&w


Type/Inzetbaar:
„Systeem 3” en „Systeem 3 Dash M”
Kleur: Zilver

0307 01  5 paar

Neusbruggen met padsteunen voor kunststof monturen



- Kliksysteem
- Montage door twee parallelle boringen van 1,0 mm
- Afstand tussen boringen: 12 mm
- Fixatie d.m.v. 2 pins aansluiting
- Kleur: Zilver

0306 02  2 stuks



- Schroefstelsysteem
- Montage door twee parallelle boringen van 1,0 mm
- Afstand tussen boringen: 12 mm
- Fixatie d.m.v. 2 pins aansluiting
- Kleur: Zilver

0306 01  2 stuks



Padsteunen voor metalen monturen



Type/Inzetbaar:
Universeel inzetbaar
Kleur: Zilver

0288 01  10 stuks




Type/Inzetbaar:
Universeel inzetbaar
Kleur: Goud

0288 02  10 stuks



Type/Inzetbaar:
Universeel inzetbaar
Kleur/materiaal: Titanium

f&w **0288 03**  10 stuks



Type/Inzetbaar:
Universeel inzetbaar
Kleur: Zilver

f&w **0289 01**  10 stuks



Type/Inzetbaar:
Pads met klemsysteem
Kleur: Zilver

0299 01  5 paar



Type/Inzetbaar:
Pads met klemsysteem
Kleur: Goud

0299 02  5 paar



De passende neuspads vindt u op pagina F 14 bij Nr. 0243 02, 0243 03, 0243 12 en 0243 13.



Type/Inzetbaar:
Universeel inzetbaar
Kleur: Zilver

0287 01  5 paar




Type/Inzetbaar:
Universeel inzetbaar
Kleur: Goud

0287 02  5 paar




Type/Inzetbaar:
Universeel inzetbaar
Kleur/materiaal: Titanium

f&w **0287 03**  5 paar



Type/Inzetbaar:
„System 3“ und „System 3 Dash M“
Kleur: Zilver


f&w **0276 01**  10 stuks



De passende neuspads vindt u op pagina F 8 bij Nr. 0276 11, 0277 11 en 0279 11.



Type/Inzetbaar:
Pocket pads
Kleur: Zilver

f&w **0281 01**  5 paar

